

Corset compresor
Costillas aladas



IMPLEX
precision + innovation

Corrección de las costillas aladas

El Corset está diseñado para el tratamiento no quirúrgico de las costillas aladas en niños y adolescentes. Su estructura ligera aplica una presión controlada sobre la zona costal prominente, favoreciendo el remodelado del tórax mientras el paciente continúa con sus actividades diarias con normalidad.

Ventajas principales

Su estructura ligera y los cierres regulables permiten un ajuste preciso en cada etapa del crecimiento. Las almohadillas distribuyen la presión sin generar molestias, lo que facilita un uso prolongado y constante, clave para la eficacia del tratamiento.



Indicaciones de uso

- Indicado para pacientes en fase de crecimiento con deformidad costal flexible o en desarrollo.
- Se recomienda su uso continuado siempre bajo supervisión médica, pudiendo combinarse con ejercicios respiratorios o fisioterapia para así potenciar los resultados.
- No utilizar en deportes de contacto, ni en casos con inflamaciones activas o tos crónica.

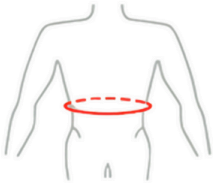
Diseño y fabricación

Fabricado en aluminio con un recubrimiento hipoalergénico, ofrece estabilidad sin limitar el movimiento. Su diseño discreto permite llevarlo debajo de la ropa, promoviendo la adherencia al tratamiento sin afectar la vida social ni emocional del paciente.



Conozca todas nuestras tallas disponibles

El Corset Compresor para Costillas Aladas está disponible en dos tallas para adaptarse al contorno torácico de cada paciente. Elegir la talla correcta garantiza un ajuste óptimo y un tratamiento más eficaz.

Tamaño	Altura del paciente	Circunferencia de la cintura en la parte inferior de las costillas	Método de medición
1/M	<150 cm	60 – 85 centímetros	
2/L	>150 cm	75 – 100 centímetros	

¿Cómo medir correctamente?

Para elegir la talla adecuada, mida con una cinta métrica el contorno torácico a la altura de las últimas costillas, manteniendo la cinta paralela al suelo y sin apretar demasiado. Si el paciente está entre dos tallas, se recomienda elegir la más grande para mayor comodidad.

**“CONFIANZA
EN CADA
MOVIMIENTO.”**





Distribuido por

IMPLEX precision + innovation

Calle Mayor 50, 3º oficina D, 28921 Madrid

+34 624 506 300 | +34 600 065 476

contacto@implex3d.com

www.implex3d.com